

Polly PAL™



No fabricado con látex de caucho natural. Libre de di(2-etilhexil) ftalato (di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP).

Hay más información disponible en línea en www.dandleLIONmedical.com

USO PREVISTO:

Ayuda al personal clínico a posicionar adecuadamente a bebés prematuros y enfermos hospitalizados en posición prona, supina y lateral. Puede también ser usado para dar soporte al posicionamiento de equipamiento médico dentro de la cama del niño.

ADVERTENCIAS:

- Solo para uso hospitalario.
- Se debe tener especial cuidado para evitar colocar todo el peso o demasiados microdiscos encima de los bebés pequeños.
- No lo coloque cerca del cuello o la cara del bebé ni lo use de ninguna manera que pueda restringir las vías respiratorias del bebé.
- Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, lave y seque de acuerdo con las políticas del hospital.
- Si los microdiscos se aflojan alguna vez o si se produce un agujero en la cubierta de tela, deséchelos de inmediato.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Polly PAL es un producto lavable y reutilizable.

- Lavar a máquina y secar a una temperatura de hasta 71°C.
- Se recomienda blanqueador sin cloro.



INSTRUCCIONES DE USO:

Polly PAL es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede utilizar de diversas formas.

- Colóquelo alrededor de la cabeza o los pies del bebé para crear un límite, ayudar a mantener una posición o darle una sensación de seguridad.
- Úselo para sostener un chupete o un tubo de apoyo.
- Mueva los microdiscos en diferentes lugares para que las partes o secciones estén más llenas o menos llenas para acomodar el equipo o las necesidades de posicionamiento del bebé.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.



Rev 2:0525



Tarry Medical Products Inc.
dba Dandle•LION Medical
22 Shelter Rock Lane
Danbury, CT 06810 USA
+1 203-791-9001

www.dandleLIONmedical.com
© DandleLION Medical 2009

EC REP

Advena Medical
Tower Business Centre
2nd Floor, Tower Street
Swatar BKR 4013 Malta